


Lubristil®

30 ENVASES
UNIDOSIS
DE 0,3ml

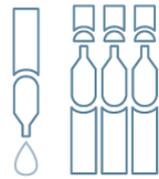

Solución oftálmica hipotónica humectante y lubricante

Hialuronato sódico al 0,15%

Lubristil, por sus propiedades humectantes y viscoelásticas, se utiliza para la lubricación e hidratación de la superficie ocular, en todos los casos de irritación y/o sequedad debido a las alteraciones de la película lacrimal.

El producto no contiene conservantes, por lo que puede ser utilizado por los portadores de lentes de contacto.

Lubristil proporciona un alivio instantáneo y una duradera sensación de bienestar.

Composición: Hialuronato sódico, cloruro de sodio, disodio fosfato dodecahidrato, fosfato de sodio monobásico monohidratado, agua purificada.

Presentación: 30 envases unidosis de 0,3 ml y un prospecto.

Indicaciones: **Lubristil** está indicado en todos los casos de molestias oculares. En particular, alivia las irritaciones y sequedad debidas a alteraciones cuali-cuantitativas de la película lacrimal o factores ambientales como polen, polvo, deslumbramiento, contaminación, y el uso de ordenadores.

Lubristil está indicado para aliviar los síntomas de molestia ocular derivados del uso de lentes de contacto.

Asimismo, asegura la protección de la superficie ocular durante los procesos de cicatrización de lesiones.

Características y mecanismo de acción: **Lubristil** contiene hialuronato sódico, polímero natural presente en diversos segmentos del ojo humano. Las particulares características físicas del hialuronato sódico confieren a la solución importantes propiedades viscoelásticas. **Lubristil** cubre la superficie del ojo, y por sus características lubricantes e hidratantes, reduce la fricción causada por movimientos oculares como el parpadeo y asegura protección durante los procesos de reparación del epitelio de la córnea. Por lo tanto **Lubristil** garantiza una sensación de bienestar duradero y una máxima comodidad.

Lubristil no contiene conservantes y su tolerancia es máxima.

Dosis y administración: Instilar 1 gota de **Lubristil** cuatro veces al día en el saco conjuntival, o según necesidad.

Instrucciones de uso:

Lavar/desinfectar las manos antes de utilizar.

1. Comprobar que el envase unidosis no esté dañado.
2. Separar un envase unidosis de la tira.
3. Abrir dando vueltas a la parte superior, sin tirar.
4. Instilar **Lubristil** evitando que la extremidad del envase unidosis entre en contacto con el ojo o con cualquier otra superficie.



Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Precauciones y advertencias:

-  No utilizar **Lubristil** si el envase está abierto o dañado.
- No tocar el extremo del envase abierto y evitar el contacto directo con el ojo o con cualquier otra superficie.
- Debe utilizarse cada envase unidosis inmediatamente después de abrirlo.
- El producto no contiene conservantes, por lo que la solución no utilizada una vez abierto el envase, debe ser desechada ya que puede contaminarse, exponiendo el ojo al riesgo de infección.
- Conservar a temperatura inferior a 30°C. No utilizar **Lubristil** después de la fecha de caducidad.
- No desechar en el medio ambiente después del uso.

La administración de **Lubristil** a niños o personas con capacidades limitadas debe ser supervisada por un adulto responsable.

Interacciones con otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular: Se desconocen las interacciones con la administración de otros medicamentos oftálmicos, pero se aconseja no utilizar otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular hasta 10 minutos después de administrar **Lubristil**.

Efectos adversos: El uso del producto puede causar ocasionalmente intolerancias (ligera sensación de ardor o irritación).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para uso tópico ocular.

Fabricado por:

SIFI S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALIA

Comercializado por:

ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona - España
www.lubristil.es

Lubristil es un producto sanitario estéril

Última revisión del texto: febrero 2020

